

## روش استفاده :

### 1- شرح :

دستگاہی است که موفق به دریافت گواهینامه شورای اروپا ( نوع 1) اهدا شده از مسئولیت بهداشتی اتحادیه اروپا گردیده است .

GEXL از یک حلقه پلاستیکی در پایه ، دو گیره فلزی و یک قطعه فوقانی پلاستیکی تشکیل شده است که بر روی این قطعه یک نوار نصب می شود. قطعات پلاستیک غیر قابل اشتعال هستند.

نوجه : برای سهولت لغزندگی بهتر است . بین قطعات فلزی دستگاہ از مقدار کمی روغن استفاده شود.

### 2- انواع GEXL :

GEXL : برای آلت 10 سانتیمتری در حالت نعوظ.

MINI GEXL : برای آلت 6 تا 10 سانتیمتری در حالت نعوظ.

GOLD GEXL : ( برای اشخاصی که حساسیت دارند) برای آلت از 10 سانتیمتری به بالا ، در حالت نعوظ.


### 3- موارد درمانی :

بلندتر شدن آلت بدون جراحی، اصلاح انحرافات آلت بدون جراحی ، درمان بیماری پیرونی ( Peyroni ) ، معالجه پس از عمل جراحی بلند شدن آلت ، جراحی اصلاحی و بازسازی. توجه : اگر دقیقاً " توصیه ها را در نظر بگیرید. هیچ

عوارض جانبی ندارد کسانی که دچار انزال زودرس یا عدم نعوظ هستند و احتیاج به تقویت بافت اسفنجی آلت دارند کافی است ، هفته یک یا دو بار به مدت 4 تا 8 ساعت از دستگاہ استفاده کنند مابقی درمان میبایست توسط پزشک تکمیل گردد.

## 4- سایز آلت :

به کمک یک متر خیاطی ، طول و قطر آلت را در حالت خوابیده و نعوظ اندازه گیری کنید . اندازه‌ها را بر روی یک برگ جدول پیشرفت یادداشت کنید .

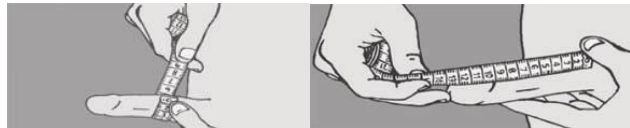

## جدول پیشرفت

ماه	تاریخ	طول آلت در حالت نعوظ	طول آلت در حالت معمولی
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

### 5- سایز اولیه دستگاہ :

اندازه اولیه GEXL ، 9 سانتیمتر و MINI GEXL ، 6 سانتیمتر است دستگاہ را از لبه پایینی حلقه پلاستیکی تا لبه بالایی محور فلزی اندازه گیری می کنند. اندازه اولیه دستگاہ را برای شروع درمان محاسبه کنید. از اندازه آلتان در حالت نعوظ 4 سانتیمتر کم کنید. به مثال زیر توجه کنید . ( در صورت انحراف آلت 5 سانتیمتر کم کنید .)

مثال یک

طول آلت در حالت نعوظ (15/7)

$15/7\text{cm} - 4 = 11/7\text{cm}$  سایز اولیه دستگاہ :

اکنون می بایستی اندازه دستگاہ را تنظیم کنید تا با سایز شخصی خود که محاسبه کردید یکی باشد ابتدا پایه پلاستیکی بالایی را جدا کنید. سپس با پیچاندن قطعه فلزی، اندازه لازم جهت رسیدن به سایز مورد دخواه را اضافه کنید. دستگاہ را از لبه پایینی حلقه پلاستیکی تا لبه بالایی محور فلزی اندازه گیری کنید.

اگر سایز شخصی محاسبه شده کوچکتر از سایز اولیه دستگاہ باشد، می بایستی در مان را با سایز کوچک دستگاہ شروع کنید.

### 6- زمان سازگاری:

مدت استفاده	سایز دستگاہ	روز
3 ساعت در روز	سایز اولیه	هفته اول

	دستگاه	
6 ساعت در روز	0/5 CM به هر طرف اضافه کنید	هفته دوم
8 ساعت در روز	0/5 CM به هر طرف اضافه کنید	هفته سوم

## 7- پیشرفت:

از هفته چهارم به بعد می توانید یکی از دو روش زیر را انتخاب کنید.

8 ساعت در روز	هر 7 روز، CM، 0/5 به هر طرف اضافه کنید	روش کلی (توصیه شده)
4 ساعت در روز	هر 3 روز CM 0/5 به هر طرف اضافه کنید . (در صورت داشتن شغل فعال فیزیکی)	روش خاص

لزومی ندارد که ساعت استفاده ، پی در پی باشد. با توجه به نیازتان به آلت استراحت بدهید و در ضمن استراحت آن را ماساژ دهید.

از ماه سوم به بعد، دستگاه را کم کم به سمت بالا ببرید، هر 10 الی 15 روز،  $0/5$  CM اضافه کنید. لزومی ندارد برای هر مرحله  $0/5$  CM را یکدفعه اضافه کنید ، این کار را به تدریج انجام دهید.  $0/3$  CM چند روز بعد،  $0/2$  CM دیگر اضافه کنید. استفاده از روش خاص ، نتایج را به کندي و اختصار پیش می برد.

## 8- استفاده از GEXL




کش سیلیکونی را درون دهانه جای دهید. استفاده از آن اجباری است . توصیه می شود دور آلت را با گاز یا پنبه بپوشانید.

هنگامی که آلت در حالت خوابیده است ، کلاهک آلت را رها سازید. سپس ، آلت را خارج کنید تا در حالت خوابیده ، به صورت کشیده بماند.

اکنون انتهای کش سیلیکونی را در دهانه های پایه ی پلاستیکی بالایی وارد کنید کش به شکل حلقه در می آید. آلت را داخل حلقه کنید و بگذارید کلاهک بر روی پایه ی بالایی جای بگیرد. دست چپ خود را بر روی پایه ی بالایی بگذارید و کمی فشار دهید تا دستگاه کمی کوتاه تر شود.

# دیاکو زندگی شیرین است اگر... *Diyaco*

با اعمال فشار به وسیله دست چپ و انگشتان دست راست، کلاهک را از نوار سیلیکونی خارج کنید تا اینکه لبه کلاهک بالای نوار قرار گیرد.

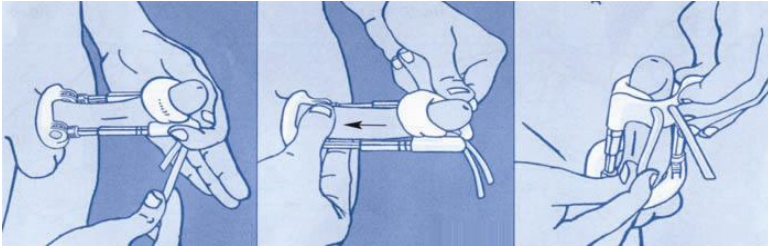

به کمک دست چپ، کلاهک را نگهدارید، با کشیدن از هر طرف کم شروع به کوتاه کردن نوار سیلیکونی کنید.

کشیدن پوست به سمت پایین، (البته به زیر و روی آن) را آهسته انجام دهید تا از نیشگون‌ها و تا خوردن‌های احتمالی سرکلاهک جلوگیری شود.

نوار می‌بایست کلاهک را آنقدر محکم نگهدار تا در نرود، اما تا جاییکه دردناک نشود، با دست راست نوار را به سمت شکاف‌هایی که در پشت پایه‌ی بالای قرار دارد، ثابت و محکم کنید اما به سمت پایین فشار ندهید تا نیشگون بگیرد. مطمئن شوید که هیچ‌تا خوردگی در راس کلاهک وجود ندارد. در غیر این صورت، پوست را به سمت پایین بکشید.

صبور و مرتب باشید این راهی است برای کسب نتایج بهتر روز اول برای عادت کردن ، 10 مرتبه دستگاه را بپوشید و در بیاورید.

هر دو ساعت یکبار دستگاه را برای دقایقی در بیاورید و اجازه دهید تا بافتهای آلت استراحت کنند. استراحت ها اجباری هستید

در مراحل پیشرفته هر 90 دقیقه یا هر 60 دقیقه استراحت دهید. در هنگام استراحت ، به آرامی آلت را ماساژ دهید. توصیه می شود، در هنگام استفاده از دستگاه آن را به سمت بالا با کمی انحراف به يك سمت بپوشانید. از شورت و شلوارهای گشاد استفاده کنید. هر چهار روز یکبار ، دستگاه را تمیز کنید.

اگر بین 15 روز تا يك ماه از دستگاه استفاده نمی کنید، درمان را با کاهش يك سانتیمتر نسبت به اندازه که در آن بودید شروع کنید. سپس بعد از 5 روز استفاده 0/5 سانتیمتر به آن اضافه کنید مجدداً " بعد از 5 روز استفاده دوباره 0/5 سانتیمتر اضافه کنید ، سپس مانند سابق ادامه دهید.

## 10- موارد خاص

الف ) اصلاح انحراف : شما باید دستگاه را در جهت عکس انحراف بپوشید، استفاده از آن برای 6 تا 8 ماه توصیه می شود. نتایج مثبتی که حاصل میگردد، بیش از 70% خواهد بود.

ب ) بیماری پرونی : مانند اصلاح انحراف عمل کنید . در عین حال توصیه می شود که به موازات آن از يك درمان دارویی با مشورت پزشك مشاور استفاده شود.

ج) جراحي آلت : توصیه های پزشکتان توجه کنید و از هفته سوم و یا چهارم بعد از عمل ، از دستگاه استفاده کنید.

د) COLDEN ERECT و درمان هورمونی : رشد سریعتر و قابل توجه تر وقتی بدست می آید که همراه با تستوسترون و زیر نظر پزشک معالج می باشد همزمان نیز باید آزمایشات انجام شود تا برخی بیماریها حذف شوند. جهت اطلاعات بیشتر به پزشک مشاور مراجعه شود.

## 11- احتیاط :

- در هنگام ورزش و دفع ادرار و اجابت مزاج ، دستگاه را در بیاورید.

- اگر هنگام استفاده از دستگاه ، احساس درد یا کبودی و یا بی حسی کردید آنرا در بیاورید کلاهک آلت را ماساژ دهید و پس از 20 دقیقه جدا " آن را بپوشید.

در صورت آزار پایه ی کلاهک ، توصیه می شود از پوشش مضاعف استفاده کنید، یکی درو کلاهک به شکل گاز یا پارچه کتان و دیگری در بیخ آلت .

اگر در حالت نعوظ هستید، نگران نباشید زیرا کاملاً " طبیعی است که آلت در برود و از دستگاه خارج شود.

وقتی دستگاه را در می آورید متوجه حس عجیب و ناراحتی و یا خواب رفتگی می شوید. طبیعی است ، این مربوط می شود به سستی بافتهایی که تحت فشار کمی بودند، و نیز طبیعی است که هر دو ساعت کم و بیش احساس ناراحتی کنید، این به معنی آن است که باید بافتها را شل کرد . بهتر است دستگاه را در بیاورید و مدتی روی کلاهک و بدنه ی آلت

را بمالید. ( دو دقیقه کافی است ) . سپس مجدداً دستگاه را بپوشید.

گاهی پیش می آید که دستگاه به دلایل نامشخصی ، بیش از روزهای گذشته شما را اذیت میکند . فردای آنروز، همه چیز دوباره طبیعی می شود.

اگر دچار کمی ورم بر روی کلاهک می شوید، نگران نشوید. این امر به احتباس مایع ( به دلیل کشش آلت ) مربوط می شود و با مالش کلاهک با انگشتان ، از بین می رود. اگر جراحت یا زخمی دارید و یا در صورت داشتن بیماری جنسی، تا طی دوره کامل معالجه و درمان از دستگاه استفاده نکنید.

مهم :

استاده از داروهای درمان طاسی ، داروهای ضد افسردگی ، و برخی از داروهای خواب آور و آرام بخش می تواند باعث کاهش رشد آلت شود.

## 12) پمادها :

آنها را به روش پیشگیرانه تهیه کنید. در صورت حساسیت و یا زخم به مدت یک هفته از دستگاه استفاده نکنند و در این زمان از پماد هیدروکورتیزن یک بار در روز و از مخلوط پماد ویتامین A + D و ZINCOXIDE دو بار در روز به مدت یک هفته استفاده کنید.

با مشاوره کارشناسان ما ،

از زندگی لذت ببرید

*Diyaco*  **دیاکو** زندگی شیرین است اگر...

### سوال و جواب های متداول :

در این قسمت سوالهایی را که افراد به دفعات پرسیده اند مطرح می کنیم و به آنها پاسخ می دهیم اگر شما پرسشی دارید در این قسمت وجود ندارد با ایمیل با ما تماس

بگیرید. [info@diyaco.ir](mailto:info@diyaco.ir)

- طرز استفاه

- کاربرد

- سوالاتی که حین استفاده از دستگاه پرسیده اند؟

- کارکرد دستگاه از نظر پزشکی

سوال و جوابهای مربوط به استفاده از دستگاه :

1- این دستگاه براساس چه اصولی کار می کند؟

این دستگاه بر مبنای اصل طبی کشش ( TRACTION ) کار می کند، یعنی هرگاه آلت به نحو کنترل شده ای تحت کشش قرار گیرد و این کشش تدریجاً افزایش یابد ، موجب رشد لیگامانهای نگهدارنده ، CORPUS CAVERMOUM و بقیه بافتهای آلت میشود.

2- آیا قبلاً هم از کشش در پزشکی استفاده شده است؟

بله ، در پزشکی مدرن از این روش برای ایجاد بافت جدید در پیوند پوست ، افزایش طول استخوان و ایجاد پوست نو ( دارای مو) برای پوشاندن نواحی طاس و بی مو استفاده می شود. البته از قدیم از این روش استفاده می شده ، مثلاً زنان بیرمانی برای دراز کردن گردن خود و نیز بعضی از قبایل آفریقایی برای بزرگ کردن لبهای خود از این متد استفاده می کردند. جوامع و فرهنگ های قدیمی از ( کشش) برای بزرگ کردن اندامهای گوناگون بدن استفاده می شود. مثلاً زنان قبیله پادوانگ ( PADUANG) در برمه که به زنان زرافه ای معروف شده اند . با استفاده از روش کشش،

گردن خود را دراز می کنند با قبایلی در آفریقا و آمازون با استفاده از همین روش لبها و گوشه های خود را بزرگ می کنند. آنها برای این کار وزنه هایی را به قسمتهای مورد نظر بدن خود آویزان می کنند.

3- بیشترین افزایش طول آلت ( با استفاده از این روش ) چقدر است؟

بستگی به شخص دارد ولی به طور تقریبی 2 تا 5 سانتیمتر افزایش طول در تعداد زیادی از مصرف کنندگان گزارش شده است.

4- حداقل افزایش طول آلت چقدر است ؟

حاصل افزایش طول یک و نیم سانتیمتر است.

5- آیا این افزایش طول ، هم در حالت عادی و هم حالت نعوظ وجود دارد؟

بله ، این افزایش طول در هر دو حالت مشهود است.

6- آیا این روش به اصلاح انحنای آلت کمک می کند؟

بله در مدت 6 تا 7 ماه می شود تا 70 درصد انحنای آلت را برطرف کرد و بهبود محسوسی را شاهد بود.

7- آیا این افزایش طول و بقیه تغییرات دائمی و پایدار خواهند بود؟

بله ، زیرا بافت آلت رشد می کند.

8- آیا افزایش طول آلت باعث لاغر شدن آن می شود؟

خیر، رشد آلت هم در طول و هم در قطر آن صورت می گیرد، چون واقعا " گوشت تازه ای ایجاد می شود.

9- سن مناسب برای استفاده از این روش چیست ؟

از 18 سالگی به بعد مردان مسن نیز می توانند از این روش استفاده کنند، مطالعات ما نشان داده که حتی مردان

- 60 تا 70 ساله نيز مي توانند از اين روش بهره ببرند،  
زيرا عمل ككش موجب تحريك رشد بافت در هر سني مي شود.  
سوالات مربوط به روش كار دستگاه و كاربرد آن :
- 1- آيا اين روش درد دارد؟  
خير ، اين وسيله يك ابزار مكانيكي بدون درد است.  
درابتدا شخصي وجود آن را حس مي كند اما پس از مدت  
كوتاهي حتي وجود آن را حس نخواهد كرد.
  - 2- آيا هنگام اادارد يا اجابت مزاج بايد دستگاه را در  
آورد؟  
بله و سپس مجدداً " دستگاه را به آلت وصل كنيد.
  - 3- چگونه مي توان از دستگاه استفاده كرد، بدون اينكه  
اعضاء خانواده ام متوجه موضوع شوند ؟  
از آن حين كار يا موقعي كه خارج از منزل هستيد استفاده  
كنيد.
  - 4- آيا مي توان در طول شب نيز از آن استفاده كرد؟  
بله گرچه بسياري از افراد كه اين كار را مي كنند، صبح  
موقع بيدار شدن متوجه مي شوند كه دستگاه جابجا شده ،  
اين جابجايي به علت غلت خوردن حين خواب و نعوظ ر موقع  
خواب است. در اين صورت هر شب فقط به مدت 3 ساعت بايد  
از آن استفاده كرد.
  - توصيه ما اين است كه در روزهائي اول ، از آن در شب  
استفاده نكنيد تا پس از گذشت مدتي كاملاً" با آن احساس  
راحتي كنيد.
  - 5- اگر حين پوشيدن دستگاه ، دچار نعوظ شدم ، چه اتفاقي  
مي افتد؟  
هيچ طور نفي شود كمي احساس فشار خواهيد كرد، اما درد  
نخواهد داشت .

6- آیا هنگام استفاده از این دستگاه ، میتوان شلور جین یا تنگ بپوشم ؟

اگر شلوار خیل تنگ نباشد، مشکلي پيش نيم آيد.

7- اگر کار من طوري باشد که باید مدت طولاني بنشینم ، آیا مي توانم از آن استفاده کنیم ؟

بله ، پزشك مشاور به شما خواهد گفت که در این قبیل موارد چگونه دستگاه را تنظیم کنید.

8- آیا اگر آب به دستگاه بخورد زنگ مي زند؟ آیا مي توان آن را شست؟

این دستگاه زنگ نمي زند ، تاییدیه اتحادیه اروپا ( EUC ) تضمین مي کند که این دستگاه بدون عیب است . این

دستگاه را مي توان هفته ي یکبار تمیز کرد.

9- آیا موهاي اطراف آلت بای تمیز شود؟  
بله

10- مبنای کار دستگاه چیست ؟ آیا باتري لازم دارد، آیا شوک الکتریکی مي دهد؟

این يك دستگاه كاملاً " مکانیکی است . این دستگاه برای

کشش آلت ( موقعی که در حالت نعوظ نباشد) به کار مي

رود و به هیچ باتري یا برق نیاز ندارد و بنابراین شوک الکتریکی ایجاد نمي کند.

سوالاتي که حین استفاده از دستگاه پرسیده اند:

1- انجام مشاوره با يك پزشك پيش از شروع کار لازم است؟  
آن عده از افرادی که به مداوای طبي خاص نیاز دارند، بهتر است این کار را انجام بدهند.

2- پزشکانی را مي شناسید که بتوانیم از آنها اطلاعات بگیریم یا سوالهایم را بپرسم ؟

- بله ، در بسیاری از کشورها متخصصانی هستند که می توانند در حین کار شمار را راهنمای کنند، لیست این افراد و نام کشورها در سایت اینترنتی موجود است.
- 3- اگر پس از حصول نتیجه و افزایش طول آلت ، × استفاده از دستگاه ادامه دهم چه اتفاقی می افتد؟
- کمی دیگر هم به طول آلت می توان اضافه کرد ، اما این افزایش طول ثانوی به آهستگی حاصل خواهد شد.
- 4- آیا ممکن است که اصلاً هیچ افزایشی طولی صورت نگیرد یا مقدار آن بسیار اندک باشد؟
- طبق تجربه ما ، احتمال عدم موفقیت در افزایش طول تنها 2/5 در صد است، در این صورت پزشک دلیل عدم موفقیت را بررسی خواهد کرد و راه حل مشکل را نشان خواهد داد.
- 5- چگونه خودم می توانم دستگاه را طویل تر کنم ؟
- برای این کار تنظیم کننده خاصی وجود دارد که موقع خرید دستگاه ارائه می شود.
- 6- تناوب زمان استفاده و استراحت ( عدم استفاده ) از این دستگاه چگونه است؟
- این دستگاه باید روزی 4 تا 8 ساعت پوشیده شود. البته می توان این زمان را بیشتر کرد. توصیه ما این است که هر 2 ساعت یکبار استراحت داده شود و دستگاه از روی آلت برداشته شود. این موقع مناسبی برای استفاه از توالتاست . ضمناً لازم نیست که از جدول زمانی خیلی دقیقی پیروی کنید ، زیرا این زمان تناوب به حساسیت فرد بستگی دارد.
- 7- اگر یک روز از دستگاه استفاده نکنیم چه می شود؟
- مشکلی پیش نمی آید.
- 8- پس از خاتمه دوره ، آیا باز هم باید به استفاده از آن ادامه دهم تا به حاکثر افزایش طول آلت برسم ؟

این کار لازم نیست ، چون حداکثر افزایش طول ، طی همان دوره صورت می گیرد .

9- آیا حین استفاده از دستگاه ، باید کرم یا پمادی را روی آلت مالید؟

با پزشک مشورت کنید در افراد مختلف متفاوت است.  
موارد پزشکی

1- آیا استفاده از دستگاه ریسک یا عوارض جانبی دارد؟  
خیر ، اگر استفاده از دستگاه مطابق دستور العمل باشد ، هیچ ریسک یا عوارض جانبی وجود نخواهد داشت .

2- آیا عمل کشش بر روی نعوظ آلت اثر می گذارد؟  
موجب ناتوانی جنسی می شود؟

خیر ، نعوظ آلت بدون بدون هیچگونه مشکلی و مطابق معمول صورت خواهد گرفت. ضمناً" به دلیل بزرگ شدن در آلت میل جنسی به شدت افزایش خواهد یافت .

3- اندازه طبیعی آلت چقدر است؟  
بین 15 تا 20 سانتی متر در حالت نعوظ ( به خصوصیات نژاد فرد بستگی دارد)

4- افزایش طول آلت به چه عوامل بستگی دارد؟  
به خصوصیات زنتیک فرد و تغییرات بافتی آلت بستگی دارد .

5- آیا شخصی که بیماری قند ( دیابت ) دارد، می تواند از این روش استفاده کند؟  
بله به شرطی که تحت مراقبت ویژه باشد و بهداشت کامل آلت را مراعات کند .

6- آیا شخصی که مشکلات قلبی عروقی دارد می تواند از این روش استفاده کند؟

بله می تواند ریسکی وجود ندارد .

7- اگر شخصي به خاطر وجود تومور پروستات يا سرطان پروستات جراحي شده باشد ، آیا باز هم مي تواند از اين روش استفاده کند؟

با پزشك مشورت کند.

8- اگر کسي دچار واريکوسل يا هيدروسل يا پروستات باشد چطور؟

با پزشك مشورت کنید.

9- اگر کسي دچار بيماري مقاربتی باشد چطور؟

او ابتدا بايد بيماري خود را درمان کند.

10- آیا فشار اندکي که دستگاه به آلت وارد مي کند دردناک يا مضر است؟

خير ، چون دستگاه باتوجه به اندازه آلت شخص و ميزان رشد آن تنظيم مي شود اگر دستورالعمل ها به درستي انجام شوند، هيچ مشکل يا ناراحتي پيش نخواهد آمد.

تضمين ها

1- آیا هيچ مطالعه علمي وجود دارد که موثر بودن و

نيز بي ضرر بودن اين دستگاه را ثابت کند؟

بله در کلينيك هاي سراسر جهان ، مطالعات بسيار زيادي انجام شده که همگي مابين کارايي و بي خطر بودن اين دستگاه هست .

2- احتمال موفقيت اين روش چقدر است؟

97/5 در صد

3- چند سال است که از اين وسيله استفاده مي شود؟

8 سال که از اين وسيله در سراسر جهان استفاده مي شود ( سال ساخت 1999)

4- آیا عده زيادي از اين وسيله استفاده کرده اند؟

تاکنون عده زیادی از مردان سراسر جهان با موفقیت از این وسیله استفاده کرده اند.  
5- آیا اطلاعات من محرمانه می ماند؟  
بله اطلاعات مربوط به شما محرمانه می ماند.  
6- آیا دستورالعمل استفاده از دستگاه آسان است؟  
بله طرز کار دستگاه بسیار خوب توضیح داده شده و انجام آن آسان است.

نظرات متخصصان

دکتر گیونتا GIUNTA اورولوژیست و جراح پلاستیک

[WWW.DRGIUNTA.COM](http://WWW.DRGIUNTA.COM)

مایلم از اختراع برای ساخت چنین وسیله مفیدی تشکر کنم . به نظر من این دستگاه بهترین وسیله مخصوص کشش آلت در بازار است . من تاکنون بیش از 4000 جراحی فالوپلاستی انجام داده ام و همیشه استفاده از این دستگاه را توصیه کرده ام .

دکتر محمد زاده : ( MOHAMADZADEH اورولوژیست ) :

[WWW.DRMOHAMADZADEH.COM](http://WWW.DRMOHAMADZADEH.COM)

مردان آسیایی یکی از نگران ترین نژادها در مورد اندازه آلت هستند، متوسط اندازه آلت مردان آسیایی 13 سانتیمتر است. کشش یکی از موثرترین و بی خطرترین روشها است که می تواند مشکل این عده را بر طرف سازد تا بتوانند روابط جنسی خوبی داشته باشند. در بین اعراب نیز تکنیکی به نام جلکینگ وجود دارد که سالها نسل به نسل منتقل می شود و اساس کار آن بر پایه کشش است.

دکتر مانکادا / ( MONCADA اورولوژیست )

[WWW.DRMONCADA.ORG](http://WWW.DRMONCADA.ORG)

از میان چند روش موجود برای افزایش طول آلت (کشش) موثرترین و بی خطرترین روش محسوب می شود. تنها وسیله ای که برای این منظور از سوی اتحادیه کارشناسان بهداشت تایید شده است. این وسیله که یکی از بزرگترین دستاوردها در زمینه پزشکی است، بخصوص برای آن افرادی که در مورد اندازه آلت خود نگران هستند.

دکتر لی زنگ (LIZHENG / اورولوژیست)

[WWW.DRLIZHENG.COM](http://WWW.DRLIZHENG.COM)

مطالعات متعدد که توسط دکتر لی زنگ بر روی 30 بیمار که عمل صحیح انحراف آلت بر روی آنها انجام شده بود. نشان داد که با استفاده از این دستگاه طی 3 ماه، یک اینچ (2/5 سانتی متر) بر طول آلت آنها اضافه شده است.

دکتر روسلان پتروویچ (PETROVICH / اورولوژیست - آندروولوژیست)

[WWW.DRPETROHCH.COM](http://WWW.DRPETROHCH.COM)

در طی تاریخ، مردان کوشیده اند تا افزایش طول آلت مردانگیشان را نشان دهند و این باعث پیدایش روشهای مختلفی شده که میزان موفقیت آنها یکسان نیست. این دستگاه که در اسپانیا اختراع شده، بهترین دستگاه طبی

است که تاکنون به بازار ارائه شده است، زیرا استفاده از آن بسیار آسان است و هرکس می تواند از آن استفاده کند. تضمین می شود که با استفاده از آن می توان 1/2 اینچ (3 سانتی متر) بر طول آلت و 0/4 اینچ (1 سانتی متر) بر محیط آلت افزود. البته گاهی افزایش طول آلت به 2 اینچ (5 سانتی متر) هم می رسد.

دکتر کارلوس دیاز (DIAZ / اورولوژیست)

در بین انواع گوناگون روشهای موجود برای افزایش آلت استفاده از این دستگاه ارزانترین و قابل اطمینان ترین و بی خطرترین است. که از سوی اتحادیه کارشناسان بهداشت اروپا ( EUHA ) و انجمنهای متعدد اوروزیستها و آندرولوزیست های سراسر جهان تایید شده است. با آن می توان 1/2 اینچ ( 3 سانتی متر) بر طول آلت و 0/4 اینچ ( 1 سانتی متر) بر محیط آن افزود . این نتایج دائمی و پایدار هستند عوارض جانبی ندارد.

دکتر صالحی ( *SALEHI* اوروزیست - آندولوزیست :  
مدتهاست که دکتر صالحی استفاده از این دستگاه را برای معالجات پس از انجام عمل جراحی بر روی آلت و یا برای افزایش طول آلت ، به بیماران خود توصیه می کند. دکتر صالحی تاکید می کند که این دستگاه موثرترین و بی خطرترین وسیله طبی مخصوص کشش است که در حال حاضر در بازار موجود است . استفاده از آن و پوشیدنش آسان است و می تواند مشکل بسیاری از مردان را حل کند.  
دکتر گومز دیه گو ( *DIGO* آندولوزیست )

[WWW.DRDIEGO.COM](http://WWW.DRDIEGO.COM)

از دهه 90 میلادی ، حوزه سلامت و زیبایی مردان با یک جهش بزرگ مواجه شده است . زیرا بازار حوزه با تقاضای جدیدی برای محصولات جنسی و وسایل بزرگ کننده آلت روبرو است .

تجارب افرادی که از دستگاه استفاده کرده اند .  
من هیچ وقت نمی توانستم از ارتباط جنسی لذت ببرم .  
من 48 ساله هستم و به خاطر کوچکی اندازه آلت ، هیچ وقت نمی توانستم از نزدیکی لذت ببرم تا اینکه با این دستگاه آشنا شدم . 8 ماه است که از آن استفاده می کنم و باید بگویم که پس از 2 ماه استفاده از دستگاه

توانستم ارتباط لذت بخشی برقرار کنم . حالا من مردی جدیدی هستم خوشحال و راضی و از نزدیکی ترسی ندارم .

در شب ازدواج همسر من آنقدر شگفت زده شد که هیچ حرفی نمی توانست بزند .

یکسال پیش از ازدواج شروع به استفاده از این دستگاه کردم در شب زفاف همسر من آنقدر شگفت زده شد که نتوانست هیچ حرفی بزند حالا ما منتظر دومین فرزندمان هستیم و نزدیکی در زندگی به یک لذت است .

ازدواج من یک فاجعه کامل بود .

به خاطر اندازه کوچک آلت دچار بی ثباتی روحی شدم که نه فقط زندگی جنسی بلکه ازدواج من را نیز به شکست کشاند، من همیشه عصبانی بودم . پس از طلاق ، تصمیم گرفتم مشکلات خود را یکی یکی حل کنم و این طور بود که با این دستگاه آشنا شدم . فقط 12 هفته است که از آن استفاده کرده ام و نتیجه آن محسوس است. حالا هنگام راه رفتن در خیابان احساس اطمینان می کنم. حالا به خودم اعتماد دارم و از زندگی لذت می برم .

سایر سوالات

1- آیا برای بزرگ کردن آلت ، هیچ متدی وجود دارد که واقعا " ثمر بخش باشد؟

با استفاده از روش جراحی و نیز وسایل کشش می توان آلت را بزرگ کرد. گرچه استفاده از ابزار کششی تنها شیوه ای است که عوارض جانبی ندارد و تاکنون بهترین روش شناخته شده است .

2- آیا وسایل کشش ( که پزشکان آنها را توصیه می کنند) تنها وسایل واقعا " موثر برای افزایش طول آلت محسوب می شود؟



همه وسایل افزایش طول، موثر نیستند. فقط آن دسته وسایلی که بر پایه مطالعات علمی ساخته شده باشد و تحت نظر پزشک از آنها استفاده شود (که بسیار مهم است) واقعا " موثر هستند. با استفاده از چنین وسایلی می توان تا 2 اینچ ( 5 سانتی متر) بر طول آلت و 0/4 اینچ ( 1 سانتی متر) بر محیط آن اضافه کرد. شرط آن فقط این است که در استفاده از آن مداومت بخرج دهید و آن را به نحو صحیحی بکار ببرند.

3- برای افزایش طول آلت ، وسایل متعددی وجود دارد که بر مبنای اصل کشش کار می کنند آیا میزان تاثیر همه این وسایل یکسان است و آیا همه آنها موثرند؟

خیر در این زمینه حقه بازیها و تقلبهایی وجود دارد. مطالعات علمی جدید که در زمینه افزایش طول آلت انجام شده فقط در مورد چند نوع وسیله معتبر است هر وسیله کششی، کشش معینی را به بدنه آلت وارد می کند پزشکان

مقدار نیروی کششی ، کشش معینی را به بدنه آلت وارد می کند پزشکان مقدار این نیروی کششی را به نحوی محاسبه می کنند که به نتیجه مطلوب یعنی افزایش طول آلت دست پیدا کند میزان این کشش باید هر هفته به مقدار کم افزایش یابد، تا رشد میان سلولی در بدنه آلت صورت می گیرد.

4- وسایلی وجود دارند که با یک کمر بند آلت را می کشند آیا آنها در زمینه افزایش طول آلت موثرند؟

میزان کشش آلت در این قبیل وسایل تحت کنترل نیست و حتی ممکن است برای آلت مضر باشد و تضمینی در مورد افزایش طول آلت وجود ندارد . این وسایل برای کشش آلت مناسب نیستند.

5- آیا این دستگاه به تنظیم احتیاج دارد تا موثر باشد؟



بله درست است از آنجا که هر ماه 0/5 سانتی متر بر طول آلت افزوده می شود بنابراین میزان کشش باید هر هفته چند میلی متر تغییر کند و طول دستگاه افزایش داده شود.

6- آیا افزایش طول آلت که با این وسیله به دست می آید در تمام طول عمر شخص باقی می ماند؟

بله درست است پس از رسیده به حداکثر طول آلت این افزایش طول در تمام عمر شخص ( بدون عوارض ) باقی خواهد ماند.

7- آیا افزایش طول آلت با استفاده از روش جراحی عوارض جانی دارد؟

بله عوارض جانی متعددی وجود دارد بعضی وقتها افرادی که عمل کرده اند تمام افزایش طول بدست آمده را طی چند ساعت پس از عمل جراحی از دست می دهند ( به علت SCAR RETRACTION ) ضمناً در این روش تضمینی وجود ندارد این نوع عمل به جراح ماهر و ورزیده احتیاج دارد چون نواحی مورد عمل حاوی تعداد زیادی رگ و عصب هستند. اگر عمل به خوبی انجام نشود ، عوارض جانی نظیر ناتوانی جنسی ، اشکال در نعوظ یا مشکلات جدی دیگری را به دنبال خواهد داشت روش جراحی روش کاملاً بی خطری برای افزایش طول آلت نیست اغلب مقدار SCAR RETRACTION ( جمع شدگی محل برش ) آنقدر زیاد است که حتی ممکن است طول آلت از مقدار اولیه آن کوچکتر شود.

8- آیا استفاده از این دستگاه موجب بهبود نعوظ می شود؟

بله این وسیله طول آلت و محیط آن را افزایش می دهد بنابراین عروق جدیدی ( NEOVASCULARIZATION ) بوجود

می آید که موجب بهبود جریان خون و نتیجتاً "نعوظ بیشتر می شود.

9- آیا استفاده از این دستگاه عوارض جانبی دارد؟  
خیر این وسیله بی خطر و برای افزایش طول آلت است.  
ابزار طبی

این وسیله بر مبنای کشش کار می کند و جزء وسایل پزشکی نوع 1 طبقه بندی شده است. این وسیله دارای تاییدیه بهداشتی از اروپا (CE) است.

این وسیله دارای یک حلقه پلاستیکی است که به دو میله فلزی متصل هستند. ضمناً یک نوار سیلیکونی و یک ساپورت پلاستیک دارد که سرآلت را در محل مناسب نگه می دارد. این یک وسیله اروپایی است که به سهولت می توان آن را پوشیده و در آورد موقع راه رفتن، خوابیدن، نشستن، ایستادن..... نیز می توان آن را پوشید.

#### اصول علمی دستگاه

این یک وسیله کششی است که برای بزرگ کردن آلت به کار برده می شود. علت رشد آلت، تکثیر سلولی بافتی است که تحت کشش مداوم قرار می گیرند. در جراحی پلاستیک از کشش برای گسترش بافت استفاده می شود. از ترمیم بافت در پوشاندن آثار ضایعات پوستی، سوختگی ها و قسمتهایی که بی مو شده اند، کاربرد دارد. ضمناً از این روش در

جراحی های ارتوپدی برای بزرگ کردن

استخوانهای بلند و استخوانهای انگشت ( PHALANGES ) نیز استفاده می کنند.

کارایی و ضمانت

این وسیله ضمانت طبی دارد چون اتحادیه کارشناسان بهداشت اروپا آن را تایید کرده است و در وزارت بهداشت اسپانیا به ثبت رسیده است. ضمناً این وسیله طبی نوع یک (

TYPE1 ( طبقه بندی شده است یعنی استفاده از آن ( چه کوتاه مدت و چه در دراز مدت) هیچگونه عوارض جانبی نخواهد داشت.

کارایی 97/5 در صد

اورولوژیستهای بسیار معتبر و خوشنامی از سراسر جهان مطالعات علمی لازم را انجام داده اند و میزان کارایی این دستگاه تا حد 97/5 در صد به اثبات رسیده است.

نتایج

هدف از این روش تحریک رشد بافتهای بدنه آلت است که به نتایج زیر منجر می شود:

افزایش طول آلت در نعوظ به مقدار 2 تا 5 سانتی متر  
افزایش طول آلت در حالت معمولی به میزان 2 تا 4 سانتی متر

افزایش دور آلت به اندازه 1/5 سانتی متر  
این وسیله باید در حالی که آلت شل است به مدت 4 تا 8 ساعت در روز پوشیده شود در این صورت طول آن هرماه به اندازه 0/5 سانتی متر افزایش پیدا می کند . باید این وسیله به مدت 4 تا ماه پوشیده شود ( بستگی دارد که چقدر رشد آلت مور نظر باشد) افزایش طولی که حاصل می شود، برای همیشه باقی خواهد ماند.  
این وسیله می تواند تا 70 در صد از انحراف آلت را برطرف کند نتیجه بین 6 تا 7 ماه حاصل خواهد شد.